

# OCULOCIN SOLAR

**Písemná informace pro uživatele. Lubrikační oční kapky 5ml. 5 jedno dávkových lahviček po 0,5ml. Zdravotnický prostředek. Úleva a harmonie pro unavené oči.**

## **Indikace:**

Oční kapky pro namáhané, podrážděné a unavené oči zabezpečující hygienu a hydrataci očí vystavených dennímu působení externích faktorů.

## **Složení:**

Čištěná voda, glycerin, extrakt z borůvek, extrakt z mrkve, extrakt z heřmánku, chlorid sodný, borová voda, tetraboritan sodný, disodium EDTA.

## **Dávkování a způsob podání:**

Aplikujte 1-2 kapky do každého oka. Uzavíratelná lahvička slouží pouze pro jednorázové použití. Lahvičku vyhodte 24 hodin po otevření. Je bezpečné používat kapky tak často, jak je zapotřebí. Bez konzervačních látek. Vhodné pro uživatele kontaktních čoček. Nekapejte přímo na kontaktní čočky. S nasazením kontaktních čoček počkejte nejméně 2 minuty po použití kapek.

## **Bezpečnostní upozornění:**

Nedotýkejte se kapátka lahvičky. Předejte tak kontaminaci.  
Nepolykejte roztok a uchovávejte kapky mimo dosah dětí.  
Nepoužívejte kapky, pokud jste alergičtí na jakoukoliv složku roztoku.  
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Nemrazte.  
Nepoužívejte kapky, pokud jsou v roztoku viditelné kousky.  
Nepoužívejte kapky, pokud je lahvička poškozena, nebo roztok z lahvičky vytéká.  
Nepoužívejte kapky po datu expirace, které je uvedeno na obalu a na lahvičce (EXP). Datum expirace odpovídá poslednímu dnu v měsíci.  
V případě podráždění konzultujte užívání kapek s lékařem. Používejte kapky dle informací z příbalového letáku, nebo kapky užívejte dle doporučení lékaře, či lékárníka.

Výrobce: UAB ORIGMED, Raguvos st.5, Kaunas, LT-44275 Litva, Tel./Fax +370 37 334655, [www.origmed.com](http://www.origmed.com)

Dovozce: ASCOMED s.r.o., Pod Cihelnou 5, 161 00 Praha 6, Česká Republika, Tel.:+420 233 313 578, [www.ascomed.cz](http://www.ascomed.cz)